



**波生生物**  
BOSON BIOTECH

## 毒品检测系列



准确、快速、简便

文号齐全、5分钟出结果

**DOA**

**厦门市波生生物技术有限公司**  
XIAMEN BOSON BIOTECH CO.,LTD

试剂用于检测尿液中的滥用药物或其代谢产物。基于胶体金标记技术与免疫层析技术所研发的快速检测试剂,操作简单便捷,适合现场检查。

## 使用方法

在进行检测前请先完整阅读说明书,并按规定操作;检测前将待测标本和检测试剂恢复至室温。


- 1、从铝箔袋中取出检测试剂;
- 2、试剂水平放置,用滴管吸取样品,加入 2~3 滴(约 80~120ul)于加样区,5 分钟观察结果;8 分钟后显示的结果无效。

## 结果判断

阳性(+):仅对照区出现一条紫红色条带,在检测区无紫红色条带出现。

阴性(-):在对照区出现一条紫红色条带,在检测区出现一条紫红色条带。

无效:在对照区未出现紫红色条带,表明操作过程不正确或试剂盒已失效。

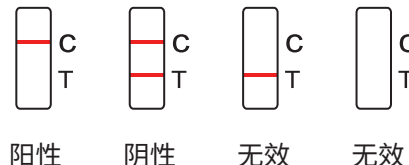

## 产品系列

产品简称	注册号	产品名称	包装与效期
OPI	国械注准 20153400419	吗啡检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 18 个月
MAMP	国械注准 20163401048	甲基安非他明检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月
MDMA	国械注准 20163401054	二亚甲基双氧安非他明检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月
THC	国械注准 20163401052	四氢大麻酚酸检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月
KET	国械注准 20163401055	氯胺酮检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月
BZD	国械注准 20163401051	苯二氮卓检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月
COC	国械注准 20163401050	可卡因检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月
AMP	国械注准 20163401047	安非他明检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月
MTD	国械注准 20163401053	美沙酮检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月
OPI/MAMP	国械注准 20163401049	吗啡、甲基安非他明联合检测试剂盒(胶体金法)	40T/盒; 24 个月