




**波生生物**  
BOSON BIOTECH

XIAMEN BOSON BIOTECH CO.,LTD

## 心脏疾病检测检测系列

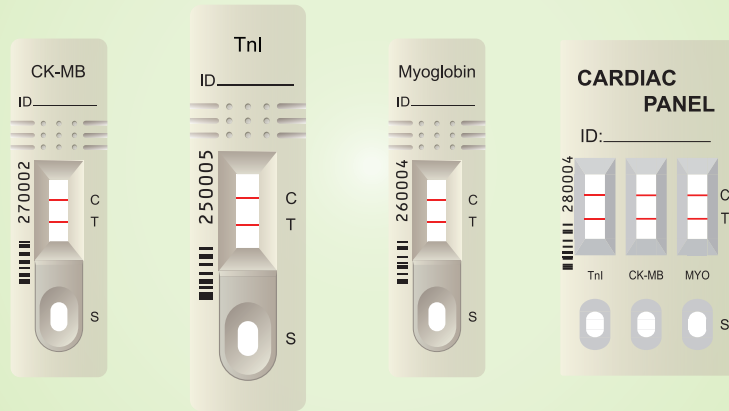

快速、简便、有助于早期诊断

**TnI/CK-MB/MYO/心肌三项**

**厦门市波生生物技术有限公司**  
**XIAMEN BOSON BIOTECH CO.,LTD**

肌钙蛋白I (TnI)、肌酸激酶同工酶 (CK-MB)、肌红蛋白 (MYO) 是诊断急性心肌梗塞的特异性指标, 及时快速检测对早期的诊断有重要的临床意义。本试剂能快速检测出心肌梗塞标志物的升高, 帮助医务人员在关键时刻对病人做出快速可靠的诊断。

## 使用方法

在进行检测前请先完整阅读说明书, 并按规定操作; 检测前将待测标本和检测试剂恢复至室温。


1. 试验前, 冷藏的试剂和检测样本应平衡至室温。
2. 撕开铝箔包装袋, 取出检测卡, 水平放置于实验台。
3. 用滴管吸取样本。
4. 在检测卡加样孔 (S), 每孔滴加 2 滴 (70~100 $\mu$ L) 样本。
5. 计时, 15 分钟读取显示的结果。

## 结果判断

阳性(+): 在对照区出现一条紫红色条带, 在检测区出现一条紫红色条带。

阴性(-): 仅对照区出现一条紫红色条带, 在检测区无紫红色条带出现。

无效: 在对照区未出现紫红色条带, 表明操作过程不正确或试剂盒已失效。

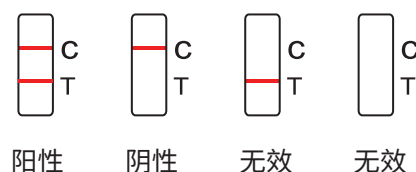

阳性

阴性

无效

无效

## 产品系列

产品简称	注册号	产品名称	包装与效期
TnI	闽械注准 20182400023	肌钙蛋白 I 检测试剂盒 (胶体金法)	25T/盒; 18 个月
MYO	闽械注准 20182400024	肌红蛋白检测试剂盒 (胶体金法)	25T/盒; 18 个月
CK-MB	闽械注准 20182400021	肌酸激酶同工酶检测试剂盒 (胶体金法)	25T/盒; 18 个月
心肌三项	闽械注准 20182400022	肌钙蛋白 I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白检测试剂盒 (胶体金法)	25T/盒; 18 个月